


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR PUMPE

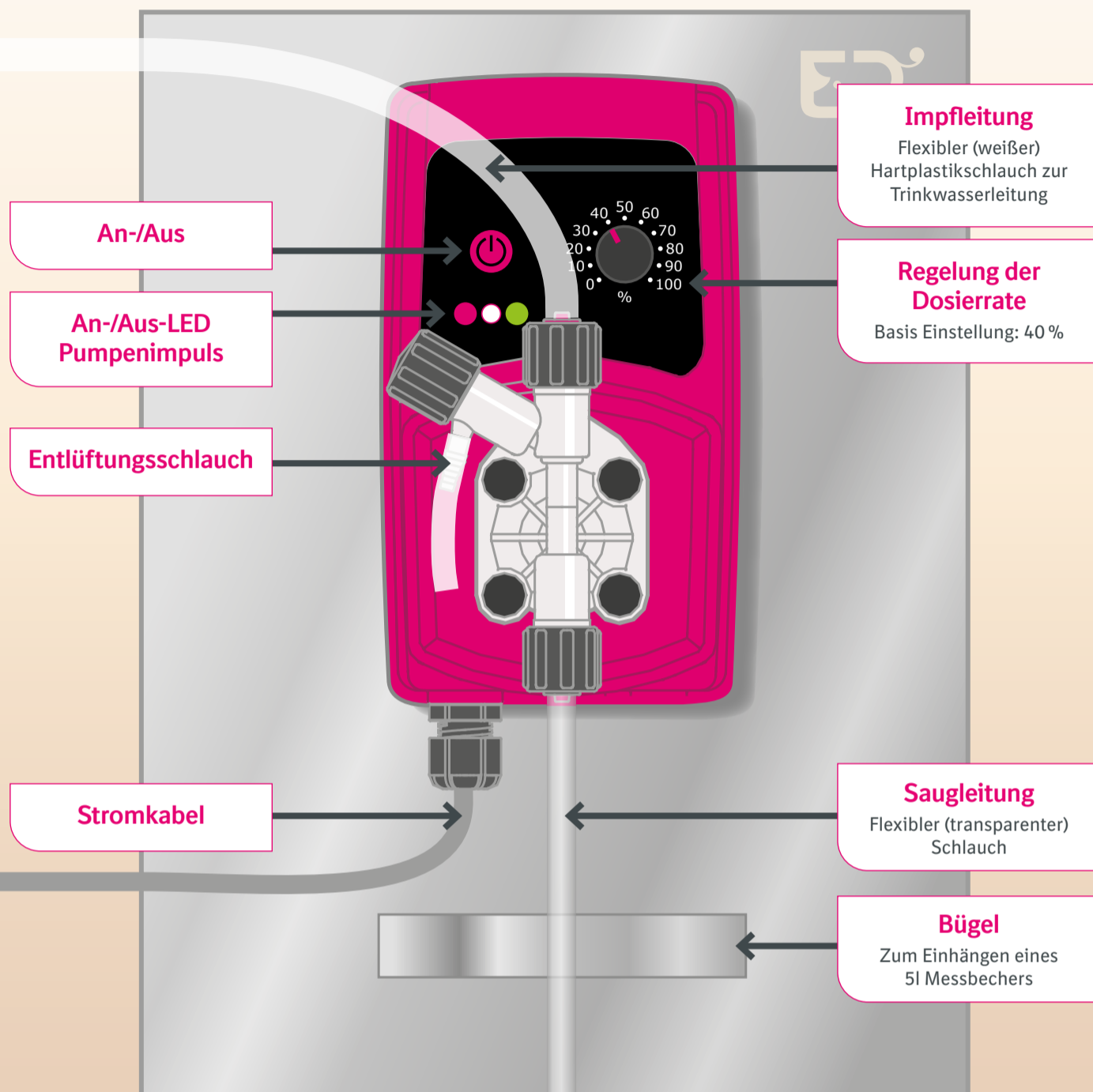

WIE SCHLIESSEN SIE DIE PUMPE AN?




Schläuche montieren

Führen Sie folgende Schritte sowohl für die Saugleitung als auch für die Impfleitung durch:


1. Überwurfmutter auf den Schlauch schieben
2. PVC-Klemmring auf den Schlauch schieben
3. PVC-Schlauchanschluss in den Schlauch drücken
4. Mit der Überwurfmutter fest anziehen.

Ziehen Sie die Impfleitung (weißer Hartplastikschlauch) fest an (5 bis 8 bar Druck).

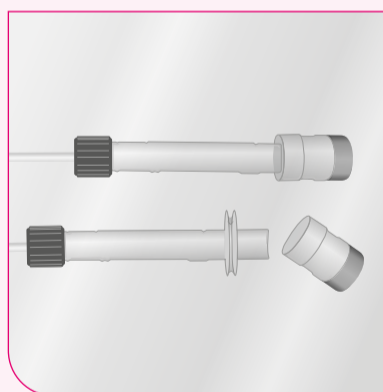


Messbecher vollständig ausleeren

Entfernen Sie das Gegengewicht mit Filter vom Saugkopf. So wird die Stammlösung vollständig dosiert und es bleiben keine Restmengen im Messbecher.

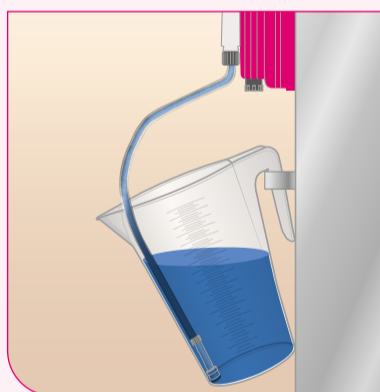


Saugschlauch aufsetzen

Stellen Sie die Länge der Saugleitung so ein, dass der Saugkopf am Boden des Messbechers verbleibt. Schneiden Sie dafür ein Stück flexiblen Schlauch von ca. 40 cm ab.

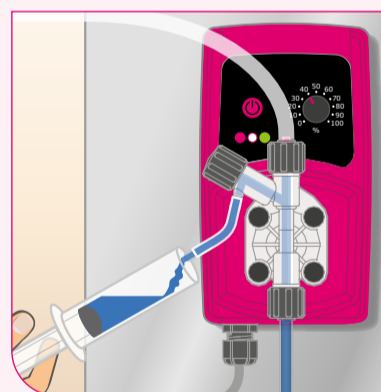

Entlüften

- Kleines Stück Saugschlauch an das Entlüftungsventil montieren
- Entlüftungsschraube öffnen
- Flüssigkeit mit einer Spritze ansaugen, bis die Pumpe flüssigkeitsgefüllt ist
- Entlüftungsschraube wieder fest anziehen.

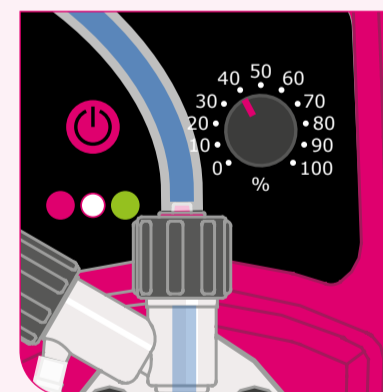

Pumpe einstellen

Dosierate auf 40 % einstellen



Fragen? Benötigen Sie einen Impfcheck?
Gehen Sie auf www.ileitis.de unter Service finden Sie Ihre Ansprechpartner.

Lesen Sie die Anweisungen vor dem Gebrauch.